

SPECTRASOL
BIODYNAMIC HUMAN SOLUTIONS



Přenosná fototerapeutická lampa Spectrasol se vzdálenou správou



NÁVOD K POUŽITÍ

Vyvinuto a ověřeno ve spolupráci



NU^DZ
NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Zdravotnický prostředek

Riziková třída I.

Přenosné fototerapeutické zařízení SPECTRASOL (dále jen „zařízení“) je přenosné zařízení velikosti palubního zavazadla (65 x 35 x 16 cm) koncipované jako kovový kufr pro zajištění dobré přenositelnosti a odolnosti. Zařízení se skládá ze dvou křídel – levého a pravého. Dominantní část plochy obou křídel tvoří difuzor rozptylující světlo z LED modulů integrovaných uvnitř přístroje a tvoří tak hlavní – vyzařovací část terapeutické pomůcky. Po otevření je celková vyzařovací plocha velká 53,5 x 60 cm. Otevřené zařízení je možné stabilně postavit na stůl tak, aby světelná plocha byla v úrovni očí sedícího člověka. Ve spodní části levého křídla je konektor pro připojení napájecího kabelu Hlavní vypínač, ovládací tlačítko a kontrolky. Zařízení o hmotnosti 8 kg lze bezpečně přenášet pomocí pevného madla.

Zařízení je vybaveno technologií zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz, včetně odpovídajícího světelného výkonu.

Účel použití:

Zdravotnický prostředek je určený pro podporu psychického zdraví, jako podpora léčby, nebo jako prevence sezónní deprese (SAD) prostřednictvím stabilizace cirkadiánních rytmů.

Pokyny k použití:

Pro správné používání a zajištění stanovené životnosti zařízení si před prvním použitím pozorně přečtěte tento návod k používání. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody či újmy na zdraví způsobené nedodržением pokynů uvedených v tomto návodu. Součástí návodu je popis zařízení a pokyny k jeho používání a údržbě. Návod k používání však v žádném případě nenahrazuje doporučení lékaře se znalostí problematiky (dále jen „odborně způsobilá osoba“).

Upozornění: V rámci terapie nelze používat světelný kufr jinak než dle pokynů odborně způsobilé osoby. Zařízení se používá výhradně v ranních a dopoledních hodinách. Expozice v nevhodnou dobu může mít silný negativní vliv na cirkadiánní rytmus a tím i emoční stabilitu, proto nikdy nepoužívejte zařízení večer a v noci!

Indikace

Toto zařízení díky svému patentovanému spektrálnímu složení simuluje přirozené biologickou účinnost a další vlastnosti slunečního světla. Vyrovňuje tak nedostatek světla během tmavých ročních období. Zejména v zimním období, kdy je u citlivých jedinců nedostatek denního světla a slunečního záření nedostačující pro synchronizaci biologických rytmů v organismu. Expozice jasnému světlu, které zařízení vyzařuje, působí jako signál pro biologické hodiny, podporujících správnou sekreci denních a nočních hormonů. Každodenní expozice v ranních hodinách napomáhá udržet pravidelnost rytmu spánku a bdění, a tím podporuje psychické zdraví a působí jako prevence sezónních depresí.

Možné kontraindikace použití

- Vedlejším účinkem některých léků může být například světloplachost. Informujte proto odborně způsobilou osobu, zda a jaké užíváte léky proti bolesti, antidepresiva a jiné medikamenty na lékařský předpis.
- Pacient s jakýmkoli očním onemocněním (= zelený a šedý zákal, záněty sítnice, ...) musí před prvním použitím zařízení vše konzultovat s očním lékařem.
- Pacient s jakýmkoli neurologickým onemocněním (zejména migrény) musí před prvním použitím zařízení vše konzultovat s neurologem.
- Zařízení je určeno pro pokračování klinické, nebo ambulantní péče v domácích podmínkách. Jeho používání musí být v souladu se započatou medicínskou léčbou a doporučením odborně způsobilé osoby.


Možné vedlejší účinky:

- **Vždy dodržujte pokyny odborně způsobilé osoby!** Veškeré problémy konzultujte vždy s odborně způsobilou osobou.
- Zaznamenáte-li mírné obtíže jako bolest hlavy, pálení očí – vyvarujte se přímému pohledu do světelné plochy, upravte (zvyšte) vzdálenost světelné plochy zařízení od očí, proveďte několikadenní pauzu, dokud příznaky nezmizí.
- Vyskytnou-li se středně vážné až vážné obtíže jako nevolnost či problémy se spánkem, okamžitě přerušete terapii, ověřte si, zda zařízení používáte podle instrukcí odborně způsobilé osoby a další používání zařízení konzultujte s odborně způsobilou osobou.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Obsluha zařízení:

1. Umístěte kufr na pevnou podložku, například stůl (viz obrázek 1). Pro správnou orientaci zkontrolujte, že šipka UP na polepu na vnější straně kufru směřuje směrem ke stropu a šipka DOWN směrem k podložce, na které je kufr otevřen. Zařízení otevřete podle svislé osy. Z prostoru v levém křídle zařízení vyjměte napájecí kabel a zapojte jej do konektoru v panelu pravého křídla. Střed osvětlovací plochy by měl být v úrovni vašich očí. Posadte či postavte se cca 50 cm od středu vyzařovací plochy (přibližně vzdálenost natažené ruky). Takto umístěné zařízení má optimální účinnost. Dodržujte základní požadavky stanovené v článku „Informace o EMC – elektromagnetické kompatibilitě“

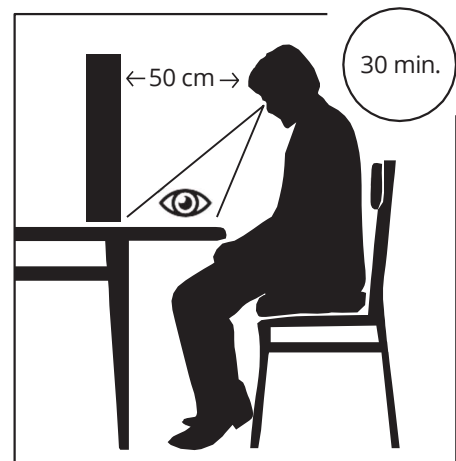

Obr 1: Modelová situace doporučeného používání

POSTUP SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ:

1. Postavte kufr na stabilní povrch, šipkou UP směrem nahoru

2. Vyměňte napájecí kabel z pravého křídla a zařízení připojte do elektrické sítě

3. Zařízení zapněte kolébkovým vypínačem ON/OFF nad vstupem napájecího kabelu

BEZ REAKCE
tlačítko nesvíí,
neblíká, bez
zvukového signálu

CHYBA

Zařízení vypněte
kolébkovým
vypínačem
ON/OFF

Kontaktujte
odborně způsobilou
osobu nebo
přímo servis

Zazní ZVUKOVÝ SIGNÁL - tlačítko se ROZSVÍTÍ

NASTAVENÍ WI-FI

Pro vyvolání ovládacího režimu

Během 5s od spuštění 3x krátce stiskněte tlačítko (po každém správném stisknutí se ozve pípnutí).

Tlačítko blíká

Terapie je blokována, nelze pustit, zařízení je v režimu nastavení.

Zařízení vytvořilo Wi-Fi síť

TWi-Fi SSID: svetelny-kufr

Připojte se k webovému rozhraní kufru

Připojte se k Wi-Fi svetelny-kufr, otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu
IP adresa: 192.168.10.1

Nastavte připojení kufru

Na webové stránce zařízení otevřete kartu Nastavení Wi-Fi. Ze seznamu vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit a zadejte její heslo

Nastavení dokončeno

Nastavení dokončeno, opakujte jej pouze v případě, přesunete-li se mimo dosah zvolené Wi-Fi sítě

Pro ukončení nastavení zařízení vypněte kolébkovým vypínačem

ZAHÁJENÍ TERAPIE

Vyčkejte cca 5s od úvodního zvukového signálu

Tlačítko blíká

Tlačítko neblíká (zhasne)

Dlouhým stiskem zahajte terapii

V průběhu terapie je vygenerován náhodný interval na udržení pozornosti. Po jeho uplynutí zařízení pípne a 3x sníží a zvýší jas. Pokud se v tomto intervalu nestiskne tlačítko, kufr zhasne a tlačítko začne blikat.

Přerušení terapie

V případě, že potřebujete od zařízení odejít, dlouhým stiskem tlačítka (déle než 3s) přerušíte terapii.

Tlačítko blíká

Terapie je přerušena.

Pokračujte v terapii

Tlačítko blíká. Dlouhým stiskem tlačítka pokračujete v terapii.

Ukončení terapie

Pokud dojde k uplynutí nastaveného času terapie, dojde k jejímu automatickému ukončení. Světlo i tlačítko zůstanou zhaslé.

Pokračujte v terapii následující den.

Terapie je pro tento den ukončena nebo je kufr zapnut mimo nastavené časové okno

Kontrola pozornosti

2. Během terapie můžete číst, psát, telefonovat nebo dělat svou práci. Zamezte přímému pohledu do světelného zdroje. Snažte se však udržet doporučenou vzdálenost očí před zařízením ve vzdálenosti 50 cm (viz obr. 1 Modelová situace doporučeného používání). Zároveň však musíte zabezpečit, aby Vám předměty (kniha, noviny apod.) neclonily více než ¼ vyzařovací plochy. Doporučenou dobu terapie určuje odborně způsobilá osoba. Terapie by neměla přesáhnout 60 min./den. Zařízení v žádném případě během terapie nenechávejte bez dozoru.
3. Po ukončení terapie zařízení vypněte vypínačem v dolní části levého křídla, poté vypojte vidlici ze zásuvky a následně vypojte napájecí šňůru z konektoru v levém křídle. Napájecí šňůru uložte do prostoru v pravém křídle a řádně zajistěte stahovací páskou. Poté kufr zavřete. Při zavírání je nutné brát ohled na riziko poškození (skřípnutí) kabelu. Zavřený kufr uklidte, aby nebránil běžnému provozu místnosti a aby se minimalizovalo riziko náhodného poškození.

Upozornění:

Pokud se Vám po spuštění zařízení bude zdát světlo příliš intenzivní, vyčkejte cca 5 minut, ve většině případů se oči během této doby adaptují. Pokud pocit příliš vysokého jasu přetrvává, je možné upravit (zvýšit) vzdálenost světelné plochy kufru od očí. Pokud se k tomu rozhodnete, poznamenejte si tuto skutečnost do deníku pro pozdější konzultaci s odborně způsobilou osobou.

Během prvních použití se mohou vlivem nezvykle vysoké intenzity vyskytnout bolesti očí a hlavy, které však v následujících použitích ustanou. V případě, že potíže trvají, přerušete používání zařízení a kontaktujte odborně způsobilou osobu.

Údržba zařízení

- Přístroj nevyžaduje, kromě udržování v čistotě, žádnou speciální údržbu (tzn. seřizování, kalibraci, atd.).
- Před čištěním a údržbou se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené z elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem
- Po vyčištění se ujistěte, že se do zařízení nedostala žádná voda či jiná tekutina.
- Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, uložte ho na suché místo a mimo dosah dětí.
- Zařízení nenechávejte připojené napájecím kabelem k elektrické síti, pokud jej nebudete delší dobu používat.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zařízení nikdy nepoužívejte na vlhkých místech a neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Před použitím odstraňte všechny obaly a zařízení zkontrolujte, zda není žádným způsobem poškozené.
- Zařízení smí používat pouze osoba, které byla odborně způsobilou osobou předepsána terapie
- Děti v blízkosti zařízení by měly být během používání pod dohledem. Nejedná se o hračku!
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah tepla a otevřeného ohně.
- Minimální vzdálenost mezi zařízením a hořlavými předměty musí být alespoň 1 metr.
- Nerozebírejte ovládací panel ani jiné části zařízení
- Provozní napětí musí odpovídat hodnotám uvedeným v technickém listu
- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřýma rukama. Nedovolte, aby se na zařízení dostala jakákoliv tekutina. Zařízení může být používáno pouze v případě, že je úplně suché.
- Zařízení chraňte před silnými nárazy, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí
- Pokud je poškozen napájecí kabel, přestaňte okamžitě zařízení používat a obraťte se odborně-způsobilou osobou. Kabel musí být okamžitě vyměněn. Nikdy se nepokoušejte napájecí kabel opravovat sami.
- Pokud by zařízení utrpělo náhodné mechanické poškození, např. pád ze stolu, nesmí se zařízení dále použít, aniž by se přezkoušely jeho základní funkce u výrobce nebo ve smluvního servisu.
- V případě nesprávné funkce zařízení způsobené mimořádně silným rušením zařízení vypněte a počkejte až účinky rušení zmizí, nebo přístroj přemístěte a provozujte mimo jejich dosah. Dodržujte základní požadavky stanovené v článku „Informace o EMC – elektromagnetické kompatibilitě“.

Opravy

- Zařízení se nepokoušejte opravovat sami. Mohlo by to vést k vážným poraněním a finanční škodě.
- Pokud je zařízení před prvním použitím jakýmkoliv způsobem poškozené nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na výrobce zařízení.

ŘEŠENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Možná příčina	Řešení
Terapeutická lampa nesvítí	Zařízení je vypnuto	Zapněte zařízení
	Zařízení není připojeno k elektrické síti	Zařízení připojte k síti
	Poškození napájecího kabelu	Vyžádejte si náhradní napájecí kabel u odborně způsobilé osoby
	Poškození napájecího konektoru	Kontaktujte odborně způsobilou osobu, domluvte se na odevzdání zařízení
	Porucha LED modulu nebo elektroniky	a vyžádejte si opravu

INFORMACE K LIKVIDACI

Zařízení je klasifikováno jako elektrické a elektronické vybavení a na konci své běžné životnosti se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Likvidaci a recyklaci upravuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) č. 2002/96/ES. Informace o likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízeních se můžete dozvědět u svých místních úřadů.

Informace o EMC – elektromagnetické kompatibilitě

Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou odolnost dle IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 a IEC 61000-4-11. Může být proto používáno v takovém prostředí, kde je jakost napájecí sítě typická pro prostředí domácí zdravotní péče a prostředí profesionálních zdravotnických zařízení. V případě elektrostatického výboje může dojít k situaci, že se probíhající terapie zastaví. Po odeznění elektrostatického výboje restartujte zařízení. Po restartu se automaticky spustí znovu zvolený program. Bezdrátová zařízení komunikační techniky, jakými jsou bezdrátové domácí sítě, mobilní telefony, bezšňůrové telefony a jejich základnové stanice a přenosné radiostanice mohou toto zařízení ovlivnit a musejí být od tohoto zařízení umístěny nejméně ve vzdálenosti 1 m. Obdobně může vyvolat rádiové rušení okolních přístrojů i samotné zařízení. I zde platí zásada vhodného umístění.

TECHNICKÁ DATA

Světelné parametry

Distribuce světla	přímá
Optický systém	opálový PS kryt
CCT reálné1	5000 K
CRI	80
Flicker	Flicker free
Jas zářící plochy	<7000 cd/m ²
Zářící plocha	53,5 x 60 cm
Illuminance*	3100 lx
Melanopic illuminance*	3175 lx
Rhodopic illuminance*	3135 lx
L-cone-opic illuminance*	3161 lx
M-cone-opic illuminance*	3060 lx
S-cone-opic illuminance*	2112 lx

* v doporučené osvitové vzdálenosti 50 cm

Elektrické parametry

Napájení	100–260 V 50–60 Hz
Připojení	IEC 14
Příkon	max 40W

Mechanické parametry

Těleso	tažený Al profil, Al plech
Povrchová úprava	elox, polep
Hmotnost svítidla	8 kg
Krytí svítidla	IP20
Maximální teplota okolí	25 °C
Kalkulovaná životnost LED	L80B20 70.000 h

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

V souladu s článkem 19, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS výrobce zajišťuje a na svou výlučnou zodpovědnost dále prohlašuje, že:

- Přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu zařízení uváděného na trh s jeho technickou dokumentací a se základními požadavky stanovenými zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Výrobek je pro daný účel použití za standardních podmínek bezpečný.

UDI-DI: 8594196880611



1-S06-02-002



Servisní středisko: Spectrasol, s.r.o. <https://www.spectrasol.cz/kontakt/>

Datum vydání návodu: 12. 1. 2024 | IFU-1-S06-02-002v01



Vývoj a metodika aplikace tohoto zařízení byly vytvořeny ve spolupráci s ČVUT UCEEB a NÚDZ v projektu financovaném se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.

Případné nežádoucí účinky hlaste na kontakt: info@spectrasol.cz

Spectrasol, s.r.o.
Hájkova 1682, 130 00 Praha 3
Česká republika

